

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Conectores e Conexões

Nome Comercial: Adaptador Nipple (bico e porca) Descartável Hospitak

Modelo

PO-85120: Adaptador Nipple (bico e porca) Descartável Hospitak

Registro Anvisa: 80504540013

Prazo de Validade: 5 anos.

Embalagem unitária.

Produto Clinicamente Limpo – Pronto para Uso.

Fotos:



Descrição e Indicação

O Adaptador Nipple é um dispositivo indicado para conectar tubos ou mangueiras de suprimento de oxigênio às válvulas reguladoras ou fluxômetros instalados nas fontes de fornecimento do gás. Sua utilização permite que produtos utilizados em oxigenoterapia (não objeto deste cadastro) que possuam tubo de suprimento de O₂ com conexão padrão, possam ser utilizados.

Conteúdo

Cada unidade do Adaptador Nipple é acondicionada e comercializada individualmente em embalagem primária de Polietileno. E então, acondicionada em embalagem secundária de papelão para transporte, contendo 500 unidades (fibras de celulose + papel reciclado).

Instruções de Uso

1. Antes de utilizar, certifique-se de que o adaptador se encontra em condições de utilização.
2. Rosqueie firmemente o adaptador Nipple a um fluxômetro ou válvula reguladora de fornecimento de gás.
3. Selecione o produto para oxigenoterapia a ser utilizado e conecte uma das extremidades do tubo de suprimento de oxigênio à haste de saída do adaptador Nipple.
4. Certifique-se que não há vazamentos.

Composição:

Adaptador: Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS).

Condições de Armazenamento

Armazenar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Condições para o Transporte

Transportar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Advertências

- Fabricante recomenda o uso único.
- Não utilize o produto caso sua embalagem esteja danificada.

Precauções

- Não utilize o adaptador Nipple se encontrar vazamento.
- Não utilize este produto para qualquer outra finalidade que não a indicada.

Registrado por: BRC Logística e Serviços Ltda. Rua José Martins Fernandes (Pq. Imigrantes) Nº 601, Galpão 04, 05 E 06 CEP: 09843-400 – São Bernardo do Campo

	BRC LOGÍSTICA	IUAN-H
	<i>INSTRUÇÃO DE USO – RDC 185/01</i>	rev. 00

– SP. CNPJ: 04.986.398/0001-38. Tel: 4858-0252. Responsável Técnica: Fabiana Veiga Morales CRF-SP: 68.907.

Fabricante Responsável: Besmed Health Business Corp. No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd, Wu-Ku District, New Taipei City.