

## Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Conectores e Conexão

Nome Comercial: Conector Descartável Hospitak

## Modelo

CT-14314: Conector Reto 15mm IDx22mm OD, 15mm IDx22 mm OD

CT-14328: Conector Reto 22mm OD

CT-14327: Conector Reto 22mm ID, 15mm IDx22mm OD

CT-13110: Conector T 22mm OD, 22mm OD, 22mm ODx18mm ID

CT-13112: Conector T 22mm ID, 22mm OD, 22mm ODx18mm ID

CT-13114: Conector T 22mm OD, 22mm OD, 22mm OD

CT-13116: Conector T 22mm ODx15mm ID, 22mm OD, 22mm ODx15mm ID

CT-13150: Conector T 22mm ODx15mm ID, 22mm OD, 22mm OD

CT-13171: Conector T 22mm OD, 22 mm OD, 22mm ODx15mm ID

CT-13172: Conector 22mm OD, 22mm ID, 22mm ODx15mm ID

MP-79101: Conector 22mm ID

MP-79108: Conector 22mm OD

Registro Anvisa: 80504540023

Prazo de Validade: 5 anos.

Embalagem unitária.

Produto Clinicamente Limpo – Pronto para Uso.

**Fotos:**

<b>CT-14314</b>	<b>CT-14314</b>	<b>CT-14328</b>
		
<b>CT-13110</b>	<b>CT-13112</b>	<b>CT-13114</b>
		
<b>CT-13116</b>	<b>CT-13150</b>	<b>CT-13171</b>
		
<b>CT-13172</b>	<b>MP-79101</b>	<b>MP-79108</b>
		

**Descrição e Indicação**

O conector descartável Hospitak é indicado para auxiliar em interligações de dispositivos (mangueiras, tubos e/ou traquéias, etc) destinados ao uso na assistência ventilatória dos pacientes, com a finalidade de facilitar a conexão entre os dispositivos e de proporcionar flexibilidade na utilização dos mesmos.

## Conteúdo

O Conector é acondicionado e comercializado em embalagem primária individual de PVC. E então, acondicionado em embalagem secundária de papelão para transporte, contendo 1000 unidades por caixa (fibras de celulose + papel reciclado).

## Instruções de Uso

- 1) Antes de utilizar, certifique-se de que o conector esteja adequadamente limpo;
- 2) Instale o conector nos dispositivos de assistência ventilatória conforme requerido,
- 3) Certifique-se que não há vazamentos de gases.

## Composição:

Todos os conectores são compostos por Polipropileno (PP).

## Condições de Armazenamento

Armazenar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

## Condições para o Transporte

Transportar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

## Advertências

- Fabricante recomenda o uso único.

## Precauções

- Certificar que todas as conexões estão seguras.

	BRC LOGÍSTICA	IUCD -H
	<i>INSTRUÇÃO DE USO – RDC 185/01</i>	rev. 00

**Registrado por:** BRC Logística e Serviços Ltda. Rua José Martins Fernandes (Pq. Imigrantes) Nº 601, Galpão 04, 05 E 06 CEP: 09843-400 – São Bernardo do Campo – SP. CNPJ: 04.986.398/0001-38. Tel: 4858-0252. Responsável Técnica: Fabiana Veiga Morales CRF-SP: 68.907.

**Fabricante Responsável:** Besmed Health Business Corp. No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd, Wu-Ku District, New Taipei City.