

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Respirômetro

Nome Comercial: Exercitador respiratório fluxométrico descartável Hospitak

Modelo

TB-93100

Registro Anvisa: 80504540004

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 5 anos.

Embalagem unitária.

Produto Clinicamente Limpo – Pronto para Uso.

Fotos:



Descrição e Indicação

O Exercitador respiratório fluxométrico descartável Hospitak foi desenvolvido cientificamente para auxiliar o paciente a desenvolver exercícios respiratórios prescritos pelo terapeuta. Este produto permite mensurar e observar a capacidade inspiratória do paciente.

O produto é indicado para exercitar a função respiratória em casos de prevenção e tratamentos de complicações pulmonares associadas a traumas torácicos e tratamento de atelectasia pré e pós-operatória.

Ele tem como objetivo reexpansão pulmonar, aumento da permeabilidade das vias aéreas e fortalecimento dos músculos respiratórios.

Quando utilizado de acordo com as instruções do terapeuta respiratório, ajuda na melhoria, desenvolvimento e manutenção da capacidade respiratória do paciente (ganho de força e resistência muscular respiratória).

Seguindo de maneira criteriosa as instruções do terapeuta respiratório e utilizando o Inspirômetro de incentivo fluxométrico, o paciente obterá os benefícios da manutenção de padrões respiratórios adequados, tendo desta forma maiores possibilidades de uma recuperação mais precoce.

Conteúdo

É acondicionado individualmente em uma embalagem primária de PVC transparente, contendo instruções de uso. A embalagem secundária é em caixa de papelão (fibras de celulose + papel reciclado) contendo 14 unidades do produto. Produto não estéril pronto para uso.

Especificações

<u>Modelo</u>	<u>Descrição</u>	<u>Volume de troca gasosa</u>	<u>Indicação</u>
TB-93100	Exercitador Respiratório por Fluxo com desenho compacto composto por três câmaras com esferas de cores diferentes que se elevam durante o fluxo.	600-1200 cc/seg.	Pacientes adultos, pediátricos e geriátricos.

Instruções de Uso

1. Remova os componentes da embalagem.
2. Conecte a ponta livre (sem o bocal) do tubo no orifício da base do produto.

NOTA: Antes e após a utilização do produto, limpe e seque o bocal. Entre diferentes utilizações, mantenha o produto em sua embalagem.

3. Com a unidade em posição supina, exale normalmente e cerre os lábios ao redor do bocal.
4. Inalar o ar em quantidade e fluxo suficientes para fazer com que a esfera da primeira câmara suba, sendo que as esferas da segunda e terceira câmaras devem permanecer em repouso.
5. Para uma média de fluxo alta: Inalar o ar em quantidade e fluxo suficientes para fazer com que a esfera da segunda câmara também suba, enquanto a esfera da terceira câmara permanece em repouso. Exale...
6. Após perfazer o exercício, remova o bocal de seus lábios e expire normalmente. Relaxe...
7. Após perfazer uma inspiração profunda e prolongada, descanse por um pequeno período e respire normalmente. Depois, repita o exercício conforme orientação de seu terapeuta.

Importante: É preciso multiplicar os segundos inspirados (IMS) pelo volume alcançado na referida coluna.

Ex: 900 mL X 2 segundos sustentados \approx 1800 mL de volume inspirado.

8- Descarte após o uso.

Composição:

Bocal: Polipropileno

Corpo do produto: Poliestireno

Esferas: ABS

Tubo corrugado: Polietileno de baixa densidade e EVA.

Não contém "látex".

Condições de Armazenamento

Armazenar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Condições para o Transporte

Transportar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

	BRC LOGÍSTICA	IUEF-H
	INSTRUÇÃO DE USO – RDC 185/01	rev. 00

Advertências

- Utilizar o produto somente quando a embalagem estiver íntegra.
- Utilizar o produto somente com as orientações do Terapeuta Respiratório.
- Este produto é recomendado para uso individual, não devendo ser utilizado por mais de um paciente.
- Produto de uso único. Proibido reprocessar.

Registrado por: BRC Logística e Serviços Ltda. Rua José Martins Fernandes (Pq. Imigrantes) Nº 601, Galpão 04, 05 E 06 CEP: 09843-400 – São Bernardo do Campo – SP. CNPJ: 04.986.398/0001-38. Tel: 4858-0252. Responsável Técnica: Fabiana Veiga Morales CRF-SP: 68.907.

Fabricante Responsável: Besmed Health Business Corp. No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd, Wu-Ku District, New Taipei City.