

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Respirômetro

Nome Comercial: Exercitador respiratório volumétrico descartável Hospitak

Modelo

Código	Graduação Máxima (mL)	Graduação Mínima (mL)	Intervalos de Graduação
TB-93250	2500	250	250 mL, com marcação numérica de 500 em 500 mL
TB-93500	5000	500	500 mL, com marcação numérica de 1000 em 1000 mL

Registro Anvisa: 80504540007

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 5 anos.

Embalagem unitária.

Produto Clinicamente Limpo – Pronto para Uso.

Fotos:

Descrição e Indicação

O Exercitador respiratório volumétrico descartável Hospitak foi desenvolvido cientificamente para auxiliar o paciente a desenvolver exercícios respiratórios prescritos pelo terapeuta. Este produto permite mensurar e observar a capacidade inspiratória do paciente.

O Exercitador respiratório volumétrico descartável Hospitak é indicado para exercitar a função respiratória em casos de prevenção e tratamentos de complicações pulmonares associadas a traumas torácicos e tratamento de atelectasia pré e pós-operatória.

O Exercitador respiratório volumétrico descartável Hospitak tem como objetivo reexpansão pulmonar, aumento da permeabilidade das vias aéreas e fortalecimento dos músculos respiratórios.

Quando utilizado de acordo com as instruções do terapeuta respiratório, ajuda na melhoria, desenvolvimento e manutenção da capacidade respiratória do paciente (ganho de força e resistência muscular respiratória).

Seguindo de maneira criteriosa as instruções do terapeuta respiratório e utilizando o Exercitador respiratório volumétrico descartável Hospitak, o paciente obterá os benefícios da manutenção de padrões respiratórios adequados, tendo desta forma maiores possibilidades de uma recuperação mais precoce.

Conteúdo

O produto é acondicionado individualmente em uma embalagem primária de PVC transparente, contendo instruções de uso. A embalagem secundária é em caixa de papelão (fibras de celulose + papel reciclado) contendo 14 unidades do produto. Produto não estéril pronto para uso.

Especificações

<u>Modelo</u>	<u>Descrição</u>	<u>Volume de troca gasosa</u>	<u>Indicação</u>
TB-93250	Exercitador Respiratório Volumétrico, compacto e de desenho ergonômico (com punho). O êmbolo deve ser elevado até atingir a capacidade máxima ou nível pré-determinado.	2500 cc/seg.	Pacientes Adultos e Pediátricos
TB-93500	Exercitador Respiratório Volumétrico, compacto e de desenho ergonômico (com punho). O êmbolo deve ser elevado até atingir a capacidade máxima ou nível pré-determinado.	5000 cc/seg.	Pacientes Adultos.

Instruções de Uso

Exercitador Volumétrico

1. Retire os componentes da embalagem e ligue a extremidade aberta do tubo corrugado na parte da frente do exercitador.
2. Mova o ponteiro na parte lateral até o nível de volume prescrito.
3. Mantenha ou segure o exercitador numa posição vertical. Expire normalmente. Depois, aperte os lábios fortemente sobre a beça bucal.
4. Inspire lentamente para elevar o pistão na câmara. A esfera irá subir de acordo com a pressão do ar criada. Tente manter a bola na região de "cara feliz" do indicador de treinamento.
5. Continue a inspiração, tentando elevar o pistão ao nível de volume prescrito (o topo do pistão indica o volume inspirado). Quando acabar a inspiração, retire a peça bucal, retenha a respiração como indicado, e expire normalmente. Deixe o pistão voltar ao fundo da câmara.

Descanse e repita os exercícios. A frequência de utilização e os volumes inspiratórios recomendados devem ficar ao critério do médico ou profissional de saúde respiratória.

NOTA: Para cuidados à unidade, depois de cada utilização, lave a peça bucal e agite até secar. Coloque a unidade neste saco quando não estiver a ser usada. Quando o exercitador estiver colocado numa mesa, entre utilizações, a extremidade com a peça bucal pode ser encaixada no topo da unidade.

Composição:

Peça Bucal: Polipropileno

Corpo do produto: Poliestireno

Esfera: ABS

Tubo corrugado: EVA

Pistão da câmara: Polipropileno de alta densidade

Ponteiro Marcador: Poliestireno

Condições de Armazenamento

Armazenar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Condições para o Transporte

Transportar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Advertências

- Utilizar o produto somente quando a embalagem estiver íntegra.
- Utilizar o produto somente com as orientações do Terapeuta Respiratório.
- Este produto é recomendado para uso individual, não devendo ser utilizado por mais de um paciente.
- Produto de uso único. Proibido reprocessar.

Registrado por: BRC Logística e Serviços Ltda. Rua José Martins Fernandes (Pq. Imigrantes) Nº 601, Galpão 04, 05 E 06 CEP: 09843-400 – São Bernardo do Campo – SP. CNPJ: 04.986.398/0001-38. Tel: 4858-0252. Responsável Técnica: Fabiana Veiga Morales CRF-SP: 68.907.

	BRC LOGÍSTICA	IUEV-H
	<i>INSTRUÇÃO DE USO – RDC 185/01</i>	rev. 00

Fabricante Responsável: Besmed Health Business Corp. No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd, Wu-Ku District, New Taipei City.