

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Geral

Nome Comercial: Gorro Descartável para Sistema inFlow Hospitak

Modelo

<u>Código</u>	<u>Tamanho</u>	<u>Diâmetro Cefálico (cm)</u>	<u>Indicação (gramas)</u>
CA-63701	PP	15,7 - 17,5	< 700g
CA-63702	P	17,6 - 20	700 - 2000g
CA-63703	M	20 - 25	2000 - 3000g
CA-63704	G	>25	3000 - 4000g

Acessório:

CA-63006: Guia de Medida para Gorro e Interface Nasal



Registro Anvisa: 80504540014

Prazo de Validade: 5 anos.

Embalagem unitária.

Produto Clinicamente Limpo – Pronto para Uso.

Fotos:



Descrição e Indicação

O Gorro é indicado para uso na cabeça do paciente e tem como finalidade auxiliar na sustentação e fixação do Sistema iNFLOW (não objeto deste cadastro).

Conteúdo

Cada unidade do Gorro é acondicionado e comercializado individualmente em embalagem primária de PVC e então, acondicionada em embalagem secundária de papelão para transporte, contendo 240 unidades (fibras de celulose + papel reciclado).

Instruções de Uso

1. Utilizando o guia de medidas meça o diâmetro cefálico do paciente.
2. Selecione o gorro do tamanho correto e coloque-o sobre a cabeça do paciente.
3. Fixe o Gerador inFlow (não objeto deste cadastro) no gorro utilizando a tira de velcro
4. O gorro é indicado para uso em um único paciente e deverá ser descartado após o término da terapia com o gerador inFlow.

Composição:

Gorro: Poliéster

Tira de Velcro: 70% Poliéster x 30 % Nylon

Tira de Fixação: Algodão

Condições de Armazenamento

Armazenar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Condições para o Transporte

Transportar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

	BRC LOGÍSTICA	IUG-H
	INSTRUÇÃO DE USO – RDC 185/01	rev. 00

Advertências

- Fabricante recomenda o uso único.

Registrado por: BRC Logística e Serviços Ltda. Rua José Martins Fernandes (Pq. Imigrantes) Nº 601, Galpão 04, 05 E 06 CEP: 09843-400 – São Bernardo do Campo – SP. CNPJ: 04.986.398/0001-38. Tel: 4858-0252. Responsável Técnica: Fabiana Veiga Morales CRF-SP: 68.907.

Fabricante Responsável: Besmed Health Business Corp. No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd, Wu-Ku District, New Taipei City.