

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Máscara

Nome Comercial: Máscara Descartável de Média Concentração Hospitak

Modelos

<u>Modelo</u>	<u>Indicação</u>
OM-81112	Adulto
OM-81122	Pediátrico

Peça de Reposição

<u>Modelo</u>	<u>Conexão</u>
OT-83521- Tubo de suprimento de O2	Padrão e Universal

Registro Anvisa: 80504540005

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 5 anos.

Embalagem unitária.

Produto Clinicamente Limpo – Pronto para Uso.

Foto



Descrição e Indicação

O objetivo da Máscara Descartável de Média Concentração Hospitak é aumentar a quantidade de oxigênio disponível no ar a ser inspirado pelo paciente. Este fato permite que mais oxigênio chegue ao sangue e tecidos do paciente, o que é de fundamental importância para a manutenção da vida.

É particularmente útil no tratamento e prevenção de estados hipoxêmicos que resultam de transporte inadequado de oxigênio pelo sangue.

Possui presilha ajustável de nariz para fixação confortável e faixa elástica ajustável a face do paciente.

Utilizadas nos seguintes casos:

- falência cardíaca e/ou respiratória;
- trauma severo;
- choque;
- intoxicação por monóxido de carbono;
- envenenamentos por cianetos;
- pós-operatório imediato;
- recuperação tardia de infarto agudo do miocárdio;
- doenças pulmonares crônicas e intersticiais difusas dos pulmões;
- hipertensão pulmonar;
- insuficiência cardíaca congestiva;
- eritrocitose;
- processos degenerativos da cognição;
- apneia do sono;
- cefaleia matinal.

Conteúdo

A Máscara Descartável de Média Concentração Hospitak é composta por: 01 máscara facial e 01 tubo de suprimento de O₂ de 2,1 metros.

Cada unidade do produto é acondicionada e comercializada individualmente em embalagem de PVC e então 50 unidades são acondicionadas para transporte em caixa de papelão (fibras de celulose + papel reciclado).

A peça de reposição Tubo de Suprimento de O₂ de 2,1m também é embalada e comercializada individualmente em embalagem de PVC e transportada em caixa de papelão com 50 unidades.

Instruções de Uso

1. Conecte uma extremidade do tubo de suprimento de oxigênio à haste de entrada na máscara.
2. Conecte a outra extremidade do Tubo de Suprimento à fonte de gás.
2. Ajuste o fluxo de gás de acordo com a prescrição e verifique a permeabilidade do sistema.
3. Coloque a máscara à face do paciente cobrindo boca e nariz posicionando a tira elástica abaixo das orelhas e ao redor do pescoço.
4. Cuidadosamente, puxe o final das tiras até que a máscara esteja segura.
5. Molde a presilha metálica da máscara para melhor ajustá-la à face do paciente.
6. Descartar após o uso.

Composição:

Máscara: Policloreto de Vinila (PVC)

Conexão máscara: Polipropileno (PP)

Tubo e conexão do tubo: Policloreto de Vinila (PVC)

Não contém "látex".

Condições de Armazenamento

Armazenar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Condições para o Transporte

Transportar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Advertências

- Proibido Reprocessar.
- Descartar após o uso.

Precauções

1. Leia a instrução de uso cuidadosamente antes de usar.
2. Este produto deve ser manipulado por pessoas treinadas.

Registrado por: BRC Logística e Serviços Ltda. Rua José Martins Fernandes (Pq. Imigrantes) Nº 601, Galpão 04, 05 E 06 CEP: 09843-400 – São Bernardo do Campo – SP. CNPJ: 04.986.398/0001-38. Tel: 4858-0252. Responsável Técnica: Fabiana Veiga Morales CRF-SP: 68.907.

Fabricante Responsável: Besmed Health Business Corp. No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd, Wu-Ku District, New Taipei City.