

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Nebulizador

Nome Comercial: Nebulizador de Pequeno Volume com Bocal Descartável Hospitak

Modelo

NB-31180: Nebulizador de Pequeno Volume com Bocal Descartável Hospitak

Registro Anvisa: 80504540020

Prazo de Validade: 5 anos.

Proibido Reprocessar.

Embalagem unitária.

Produto Clinicamente Limpo – Pronto para Uso.

Fotos:



Descrição e Indicação

A terapia com nebulizadores de pequeno volume é indicada para uso em hospitais e home care. Sua finalidade é o tratamento de obstrução da via aérea. A obstrução da via aérea é uma das causas mais comuns dos problemas respiratórios e pode ser consequência dos seguintes motivos:

- doenças crônicas tais como asma, bronquite crônica e enfisema;
- exposição à poluição ambiental em local de trabalho;

- fumantes de longo prazo,
- exposição à fumaça, fumos e outras substâncias nocivas presentes na atmosfera;
- alergias, gripes, resfriados e pneumonia.

Conteúdo

O Nebulizador de Pequeno Volume com Bocal Descartável Hospitak é composto por 01 tubo T, 01 bocal, 01 copo nebulizador com tampa e 01 tubo de suprimento de Oxigênio.

Cada unidade do Nebulizador de Pequeno Volume com Bocal Descartável Hospitak é acondicionada e comercializada individualmente em embalagem primária de PVC e então acondicionados em embalagem secundária de papelão (fibras de celulose + papel reciclado) contendo 50 unidades para transporte.

Instruções de Uso

1. Abrir a parte de cima do copo do nebulizador e colocar a solução prescrita pelo médico no copo.
2. Fechar a tampa do copo do nebulizador girando-a no sentido horário.
3. Conectar o tubo de suprimento de O2 entre a fonte de gás e o nebulizador.
4. Encaixar o tubo T no copo nebulizador.
5. Encaixar o bocal na outra extremidade do tubo T.
6. Ajustar o fluxo de gás. Verifique visualmente o aparecimento de névoa. Caso necessário, dê uma leve batida no copo até que se inicie a nebulização.
7. Colocar o bocal no paciente.
8. Descartar após o uso.

Composição:

Copo do nebulizador: Poliestireno e Polipropileno.

Tampa do nebulizador: Poliestireno e Polipropileno.

Tubo T: Polipropileno.

Tubo de suprimento de O2: Policloreto De Vinila (PVC)

	BRC LOGÍSTICA	IUNB-H
	INSTRUÇÃO DE USO – RDC 185/01	rev. 00

Bocal: Polipropileno

Condições de Armazenamento

Armazenar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Condições para o Transporte

Transportar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Advertências

Proibido reprocessar.

Precauções

Certificar-se que todas as conexões estão seguras.

Registrado por: BRC Logística e Serviços Ltda. Rua José Martins Fernandes (Pq. Imigrantes) Nº 601, Galpão 04, 05 E 06 CEP: 09843-400 – São Bernardo do Campo – SP. CNPJ: 04.986.398/0001-38. Tel: 4858-0252. Responsável Técnica: Fabiana Veiga Morales CRF-SP: 68.907.

Fabricante Responsável: Besmed Health Business Corp. No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd, Wu-Ku District, New Taipei City.