

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Nebulizador

Nome Comercial: Nebulizador de Pequeno Volume com máscara Descartável Hospitak

Modelos:

Código	Copo do nebulizador	Tube de suprimento de O ₂ de 2,10 m com conector Universal	Interface com o paciente
NB-31101	6 mL	x	Máscara Alongada Adulto Grande
NB-31111	6 mL	x	Máscara Alongada Adulto
NB-31121	6 mL	x	Máscara Alongada Pediátrica

Peças de Reposição:

OM-82100- Máscara Alongada Adulto Grande

OM-82110- Máscara Alongada Adulto

OM-82120- Máscara Alongada Pediátrica

Registro Anvisa: 80504540006

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 5 anos.

Embalagem unitária.

Produto Clinicamente Limpo – Pronto para Uso.

Foto:**Descrição e Indicação**

A terapia com nebulizadores de pequeno volume é indicada para uso em hospitais e home care. Sua finalidade é o tratamento de obstrução da via aérea. A obstrução da via aérea é uma das causas mais comuns dos problemas respiratórios e pode ser consequência dos seguintes motivos:

- doenças crônicas tais como asma, bronquite crônica e enfisema;
- exposição à poluição ambiental em local de trabalho;
- fumantes de longo prazo,
- exposição à fumaça, fumos e outras substâncias nocivas presentes na atmosfera;
- alergias, gripes, resfriados e pneumonia.

Conteúdo

O Nebulizador de Pequeno Volume com máscara Descartável Hospitak é comercializado e individualmente acondicionado em embalagem primária de PVC e então acondicionados em embalagem secundária de papelão (fibras de celulose + papel reciclado) contendo 50 unidades para transporte. As peças de reposição também são acondicionadas e comercializadas em embalagem individual de PVC e então acondicionadas em embalagem secundária de papelão (fibras de celulose + papel reciclado) contendo 50 unidades para transporte.

Instruções de Uso

1. Coloque a solução prescrita no copo do nebulizador.
2. Conecte a tampa do copo do nebulizador girando-a no sentido horário.
3. Conecte o tubo de suprimento de O₂ entre a fonte de gás e o nebulizador.
4. Conecte o copo de nebulizador na máscara.
5. Ajuste o fluxo de gás. Verifique visualmente o aparecimento de névoa. Caso necessário, dê uma leve batida no copo até que se inicie a nebulização.
6. Coloque a máscara no paciente.
7. Descartar após o uso.

Composição:

Copo do nebulizador (Reservatório): Poliestireno e Polipropileno.

Tubo de suprimento de O₂ (2,10m): PVC

Máscara: PVC e Polipropileno

Condições de Armazenamento

Armazenar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Condições para o Transporte

Transportar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Advertências

- Proibido reprocessar.

Precauções

Certifique-se que todas as conexões estão seguras.

	BRC LOGÍSTICA	IUNPM-H
	<i>INSTRUÇÃO DE USO – RDC 185/01</i>	rev. 00

Registrado por: BRC Logística e Serviços Ltda. Rua José Martins Fernandes (Pq. Imigrantes) Nº 601, Galpão 04, 05 E 06 CEP: 09843-400 – São Bernardo do Campo – SP. CNPJ: 04.986.398/0001-38. Tel: 4858-0252. Responsável Técnica: Fabiana Veiga Morales CRF-SP: 68.907.

Fabricante Responsável: Besmed Health Business Corp. No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd, Wu-Ku District, New Taipei City.