

Identificação do produto e Apresentação

Nome Técnico: Cânula

Nome Comercial: Cânula de Guedel Descartável Hospitak

Modelos:

Código	Descrição	Tamanho
AW-61130	Cânula de Guedel Descartável Hospitak 30mm	30 mm
AW-61140	Cânula de Guedel Descartável Hospitak 40mm	40 mm
AW-61150	Cânula de Guedel Descartável Hospitak 50mm	50 mm
AW 61160	Cânula de Guedel Descartável Hospitak 60mm	60 mm
AW-61170	Cânula de Guedel Descartável Hospitak 70mm	70 mm
AW-61180	Cânula de Guedel Descartável Hospitak 80mm	80 mm
AW-61190	Cânula de Guedel Descartável Hospitak 90mm	90 mm
AW-61110	Cânula de Guedel Descartável Hospitak 100mm	100 mm
AW-61111	Cânula de Guedel Descartável Hospitak 110mm	110 mm
AW-61112	Cânula de Guedel Descartável Hospitak 120mm	120 mm

Registro Anvisa: 80504540008

Reprocessamento Proibido.

Prazo de Validade: 5 anos.

Embalagem unitária.

Fotos:**Descrição e Indicação**

O produto é utilizado nos procedimentos médicos auxiliares de ventilação e aeração diferencial forçada nos pacientes inconscientes.

O produto evita que a obstrução da orofaringe durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos.

No meio hospitalar é popularmente conhecida como "Chupeta", pois evita que o paciente morda a extremidade do tubo. Também denominada bloco de mordida.

Conteúdo

A cânula é acondicionada e comercializada em embalagem individual de papel grau cirúrgico/filme de polietileno-copoliamida. São então embalados em caixas de papelão com 50 unidades para transporte.

Instruções de Uso

1. Escolha o tamanho correto (o tamanho correto para um paciente é determinado pela distância entre o canto da boca e o ângulo da mandíbula (abaixo do lóbulo da orelha). A ponta deve chegar na altura do ângulo da mandíbula
2. Lubrifique e insira a cânula com a curvatura inicialmente virada para cima e depois faça um movimento de rotação de $\frac{1}{2}$ giro, de modo a seguir a curvatura da língua.
3. Em pacientes sem dentes, também pode ser inserido desde o início com sua curvatura ao longo da curvatura da língua.
4. Após inserida, é muito importante apoiar a mandíbula para manter a permeabilidade da via aérea.

	BRC LOGÍSTICA	IUCG-H
	INSTRUÇÃO DE USO – RDC 185/01	rev. 01

5. Descartar após o uso

Composição:

Polietileno.

Não contém "látex".

Condições de Armazenamento

Armazenar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Condições para o Transporte

Transportar em um local fresco, seco e protegido da luz solar direta.

Advertências

- O procedimento é de forma simplificada, porém a utilização é uma prática clínica que não deve ser realizada por leigos.
- Proibido reprocessar.
- Não utilizar o produto fora do prazo de validade ou quando a embalagem original estiver violada.

Precauções

- Certifique que a embalagem esteja íntegra, sem danos ou rasgos. Caso apresente violação na embalagem, não utilize o produto.

Registrado por: BRC Logística e Serviços Ltda. Rua José Martins Fernandes (Pq. Imigrantes) Nº 601, Galpão 04, 05 E 06 CEP: 09843-400 – São Bernardo do Campo – SP. CNPJ: 04.986.398/0001-38. Tel: 4858-0252. Responsável Técnica: Fabiana Veiga Morales CRF-SP: 68.907.

Fabricante Responsável: Besmed Health Business Corp. No. 5, Lane 116, Wu-Kong 2nd Rd, Wu-Ku District, New Taipei City.